

## Inštalácia a nastavenie interfejsu iPad

- Po zapnutí zariadenia Vyberte jazyk, krajinu a oblasť
- Aktivovať a nastaviť pripojenie k WiFi
- Nastavenie Touch ID (zabezpečenie otlakom prsta) a prístupového kódu (nastavte šesťmiestny kód)
- Nepovinné: Vytvoreniu Apple ID (pokiaľ ho už máte, použite ho), ktoré slúži ako váš osobný účet, ku ktorému sú viazané dáta

## Stiahnutie aplikácie SparkVue z AppStore

<https://apps.apple.com/sk/app/sparkvue/id361907181?l=sk>




**SPARKvue** (4+)

PASCO scientific

★★★★★ 3,0 • Hodnotenia: 1

Bezplatné

### Snímky obrazovky [iPhone](#) [iPad](#)

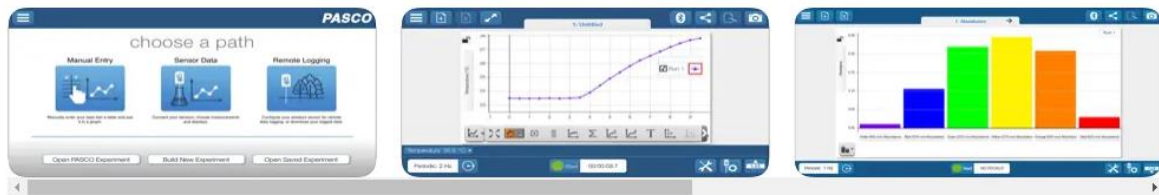

SPARKvue je populárna aplikácia na zber, vizualizáciu a analýzu dát pre STEM aktivity. SPARKvue umožňuje bezdrôtový zber dát a zdieľanie reálnych dát s kýmkoľvek na svete, pre umocnenie zážitku pri učení sa prírodných vied.

Zbierajte dáta vo svete okolo vás:

[Viac](#)

### Novinky

Dôležité zmeny vo SPARKvue 4.8.0

[História verzií](#)

Verzia 4.8.4

Nové vlastnosti

[Viac](#)

Pre plnohodnotné využitie aplikácie zadajte licenčný kľúč, ktorý ste obdržali.

## Nastavenie a používanie bezdrôtových senzorov cez rozhranie Bluetooth

Poznámka: iPad sa musí nachádzať do 10 metrov od Bluetooth zariadenia

Prejdite do Nastavenia > Bluetooth, povoľte a zapnite Bluetooth a potom klepnite na názov zariadenia (Settings /Bluetooth / ON - Nastavenie / Bluetooth / ZAPNÚŤ)

Zapnite bezdrôtový senzor Pasco a spárujte-pripojte k BT interfejsu (iPad) daný senzor.